



TTAF[®]
ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

UVC LED STERİLİZASYON ÇANTASI
DB-300-G-UVC
KULLANMA KILAVUZU



Temel Özellikler

- UV-C LED Sterilizasyon Çantası, UV-C ışınları sayesinde etkili sterilizasyon sağlar.
- Sterilizasyon süresi 3 dakikadır.
- Radyasyon, ozon, su ve kimyasal olmadan sterilizasyon sağlar.
- UV-C LED ve 360° kapsama alanı sağlayan yansıtıcı ayna ile eşyalarınızın tüm yüzeyini sterilize eder.
- Portatif tasarımı sayesinde evde, ofiste, hastanelerde, iş yerlerinde, otellerde vb. kullanım için idealdir.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: DB-300-G-UVC
Çalışma Voltajı	: 200~240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi	: 25W
Işık Kaynağı	: UV-C LED
UV Dalga Boyu	: 265~285nm
Çalışma Süresi	: 180s
Çanta Malzemesi	: PP
İç Ölçüler	: 463x338x65mm
Dış Ölçüler	: 530x400x133mm
Ağırlık	: 3300g

Paket İçeriği

- I. Sterilizasyon Çantası
- II. Güç Kablosu
- III. UV Koruyucu Gözlük

Çalışma Adımları

1. Cihazı, prize takın.
2. Cihazın kapağını açın ve sterilize etmek istediğiniz ürünü cihazın içine yerleştirin.
3. Cihaz üzerinde bulunan açma-kapama düğmesine basın.
4. Sterilizasyon işlemi 3 dakika sonunda bitecek ve cihaz otomatik kapanacaktır.
5. Sterilizasyon işlemi sırasında cihaz kapağı açılırsa, UV-C ışınım kesilecek ve kapak kapandığı anda sterilizasyona devam edecektir.



Dikkat UV-C Işık



- UV-C ışınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan sağlığı için son derece zararlıdır.
- Cildinizi ve gözlerinizi UV ışığına maruz bırakmayınız. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.



Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

    /ttafelectronic