



TTAF®

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ELEKTRONİK MASKE

Kullanma Kılavuzu



Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz
ve güvenli bir yerde saklayınız.

Teknik Özellikler

Ürün Adı	: Serbest Solunum Maskesi
Stil	: Elektronik Yüz Maskesi
Net Ağırlık	: 78g
Boyut	: 101x97x66 mm
Şarj Voltaj	: 5V
Kullanım Süresi	: 4-6 Saat
Fonksiyon	: Hava Filtreleme
Materyal	: ABS+SİLİKON
Filtre Hassasiyeti	: ≥ 99
Güç	: 0.75 W
Hava Debisi	: 5.7-6.9m ³ /h


Ürün Performansı ve Özellikleri

1. Hava Temizleyici Güç Sistemi

Mikro motor hava akışını sağlar. Akışkanlar mekaniği prensibine göre hava filtrenin dışından emilecektir. 6 kat daha hızlı hava girişi rahat nefes almanızı sağlayacaktır.

2. Filtre Koruma Sistemi

Mikro motor çalışırken hava filtre tarafından emilir. Filtre 2,5 mikrondan küçük parçacıkları (PM2.5), tozu, bakterileri, egzoz dumanını, poleni vb. maddeleri süzer. Bu ürün, insanların açık hava etkinliklerini sürdürebilmelerini ve havanın kirli olduğu zamanlarda egzersizlerini her zamanki gibi yapmalarını sağlayacaktır.

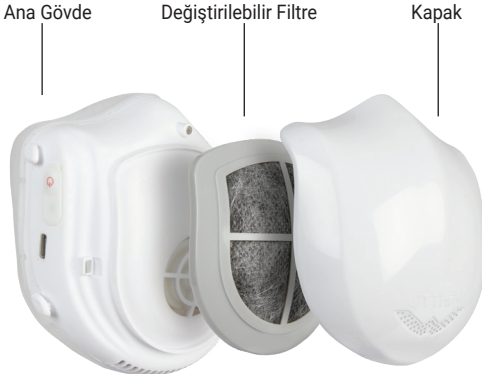

Dikkat Edilecek Hususlar ve Filtre Deęiřimi

1. Filtre sarf bir malzemedir, dñzenli olarak deęiřtirmeniz gerekir. PM2.5 endeksi 200'ñn ùzerindeyse filtre 5 ila 8 gñn boyunca, PM2.5 endeksi 200'den az ise 10 ila 15 gñn boyunca kullanılabilir.
2. Filtreyi deęiřtirirken, ònce filtre çerçevesinin iki tarafını sıkıřtırarak kullanılan filtreyi dıřarı çekmeniz ve ardından yeni bir filtre takmanız gerekir.
3. Filtrenin arkasındaki kirlenmiř alanı da kontrol edebilirsiniz. Kirlenmiř alan bñyñkse yenisiyle deęiřtirme zamanı gelmiř demektir.
4. Filtreyi deęiřtirirken, filtrenin ıslanmamasına dikkat ediniz.
5. Maske uzun sñre kullanılmadıysa eęer, filtreyi maskeden çıkartmanız ve paket içinde saklamanız önerilir.

ñrñn Temizlięi ve Bakımı

1. **Silikon yastıęın temizlięi:** Silikon yastıęı ana gñvdeden çıkarın ve su veya alkolle ovarak temizleyin. Uzun sñreli kullanımlarda ise kaynar suda bekletilmesi önerilir.
2. **Tek yñnlñ valfin temizlenmesi:** Tek yñnlñ valf maskenin altına monte edilmiřtir. Maskeden çerçeveyi çıkardıktan sonra valfi çıkarabilirsiniz. Su veya alkol ile ovarak temizleyin. Uzun sñreli kullanımlarda ise kaynar suda bekletilmesi önerilir.

Batarya Hakkında

1. Batarya Performansı ve Özellikleri

Batarya polimer yumuşak paketli, patlamaya dayanıklı lityum bir bataryadır.

1. Patlamaya dayanıklı ambalajlama ağır metal salınımına izin vermez.
2. Yüksek enerji yoğunluklu ve geleneksel lityum pillerden çok daha güvenlidir.
3. Çalışma sıcaklığı: -19°C ila 60°C.
4. Kullanım ömrü: 0,5 ≥ 500 kere.

2. Batarya Bertarafı

1. Bataryayı kendiniz sökmeyiniz. Bataryayı sökerseniz ürün garanti dışı olacaktır.
2. Batarya çevreyi kirleten maddeler içerebilir bu yüzden maske kullanılamaz hale geldiğinde çıkarınız. İlk olarak gücü kesmeniz ve silikon yastığı çıkarmanız gerekir. Daha sonra tornavida ile 6 vidayı sökünüz ve bölmeyi ayırınız, sonrasında bataryayı görebilirsiniz. Güç kablosunu çekip bataryayı çıkarabilirsiniz.
3. Bataryayı yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf ediniz. Bataryayı evsel çöplerinizle birlikte atmayınız.

Şarj Açıklaması

1. Maskeyi ilk kez kullanırken önce içindeki şarjı kullanmanızı öneririz. Daha sonra yeniden şarj edebilirsiniz.
2. Işığın kırmızıya dönmesi şarjının olmadığını işaret eder. Şarj etmek gerekir.
3. Elektrik kaynağına bağlandığında gösterge ışığı kırmızıya döner. Işık yeşile döndüğünde cihaz tam olarak şarj olmuş demektir.
4. Şarj gerilimi 5V, şarj akımı ise 0,5 C'dir. Şarj için doğru güç adaptörünü kullanınız. (5V, 1A)

Notlar

1. Maskenin çalışma sıcaklığı: -19°C ila 60°C
2. Bataryayı normal oda sıcaklığında şarj ediniz.
3. Maske uzun süre kullanılmadığında kapatınız. 3 ayda bir şarj etmenizi öneriyoruz.
4. Maskeyi temiz tutunuz, filtreyi düzenli olarak değiştiriniz.
5. Maske anoksik ortamlarda kullanım için uygun değildir.
6. Maske su altında ve yüksek ısıli ortamlarda kullanılamaz. Islandığında filtreyi değiştiriniz.
7. Maske serin ve kuru bir yerde tutulmalıdır.
8. Maske başkalarıyla paylaşımlı kullanıma uygun değildir. Kişisel kullanım içindir.

Ürünün Kullanma Kılavuzu

1. Ürün Yapısı (Resimde gösterildiği gibi)



2. Buton ve Deęiřtirme Ayarı

İki deęiřtirme ayarı vardır. 1 kere bastığınızda normal hava akıř hızını ayarlar. İkinci kez bastığınızda hava akıř hızı daha güçlü olacaktır. Üçüncü kez bastığınızda ise cihaz kapanacaktır.


Deęiřtirme Ayarı	Hava hacmi (m ³ / h)	İnsan için havalandırma (m ³ /h)
1. ayar - normal hava akıřı	3,4	Normal 0,36-2,50
2. ayar - güçlü hava akıřı	5,5	Maks. 4,20-5,20

3. Uygulanabilir Kapsam

Serbest solunum maskesi pus, PM2.5, formaldehit, polen, toz vb. maddelerden korunmak için kullanılabilir. Açık hava spor aktivitelerinde, tıbbi yerlerde, fabrikalarda, řantiyelerde vb. kullanılabilir.

4. Takma Yöntemi

Silikon kayıřları gövde kopçalarına tutturunuz sonrasında resimde gösterildięi gibi takınız. Silikon kayıřlarda ayar için 5 kademe bulunmaktadır. Yüzünüze göre ayarlayabilirsiniz.

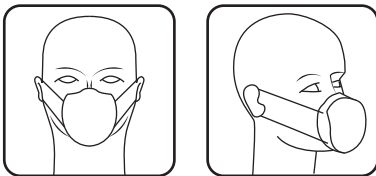

5. Temel Parametreler

Boyut	101x97x66mm	řarj gerilimi	5 V
Anma gerilimi	3,7 V	Anma akımı	160 MA
Çalıřma süresi	4-5 saat	řarj süresi	2 - 2,5 saat

Satış Sonrası Hizmetler

1. 7 gün içinde ücretsiz değişim

Maskeyi satın aldıktan sonra herhangi bir çalışmama durumunda 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirebiliriz.

2. Bir yıl garanti

Maskeyi satın aldıktan sonra bir yıl boyunca ücretsiz onarım hizmeti verilir (maskenin alındığı tarihte başlar). Bunun haricinde uygun bir ücretle tamirine de yardımcı olabiliriz.

Ürün Adı:

Modeli:

Satıcı:

Adres:

İletişim:



TTAF®

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com



/ttafelectronic