




TTAF®

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

UV-C RAGNAR
RGN-04
KULLANMA KILAVUZU

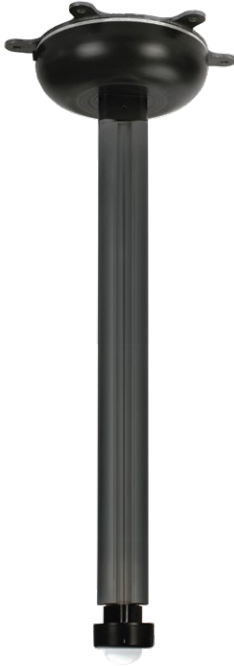

Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu ürünü tam olarak anlayabilmeniz ve kurabilmeniz için,
lütfen ilk kullanımdan önce talimatları dikkatlice okuyun.
Lütfen kılavuzu okuduktan sonra saklayın.

Temel Özellikler

- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, bulunduğu ortamı güçlü UV-C ışınımı ile sterilize eder.
- 360° Kapsama Alanı: UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, etrafını saran 3 tüp ile sterilizasyon sağlar.
- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, tavandan sarkıt montaj seçeneği sunar.
- Kurulumu kolay, pratik, sağlam ve kullanıcı dostu bir sterilizasyon cihazıdır.
- UV-C Ragnar Dezenfeksiyon Armatürü, hareket sensörü sayesinde 5m mesafeye kadar hareketi algılar. Hareket algıladığında sterilizasyon otomatik olarak durur.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	: RGN-04
Çalışma Voltajı	: 220~240VAC 50/60Hz
Güç Tüketimi	: 95W
Işık Kaynağı	: UV-C Tüp
UV Dalga Boyu	: 254nm
Işıma Gücü	: 1,16W/m ² @1m
Ölçüler	: Ø300x1450mm
Ağırlık	: 10kg
Diğer Özellikler	: Odayı terk etmek için gecikmeli işlem

Sterilizasyon Süresi

- Sterilizasyon süresi, fabrika çıkışında 1 saat ayarlanmış şekilde kullanıcıya gönderilmiştir. Bu süre sonunda maksimum 4 metre yarıçaplı alan sterilize olmaktadır.
- Farklı büyüklükte kullanılacak alanlar için zaman ayarı yapılmalıdır. Bu durumda fabrikamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için;

teknikdestek@ttaf.com.tr

Kurulum ve Çalıştırma Talimatları

1. Deldiğiniz yüzeye dübelleri yerleştiriniz.
2. Vidalar yardımıyla ürün montajını yapınız.
3. Cihazı prize takın.
4. Cihaz etkinleştirildiğinde, cihazda sarı uyarı ışığı yanıp sönerken ve bip sesi çıkarırken, insanların ve evcil hayvanların odadan çıkması için 20 saniyeleri olacaktır.
5. Cihaz sterilizasyon işlemine başladığı zaman kırmızı uyarı ışığı yanacaktır.
6. Sterilizasyon işlemi tamamlandığında yeşil uyarı ışığı yanacaktır.
7. Sterilizasyon işlemi sırasında hareket algılanırsa, UV-C ışınım kesilecek ve sarı uyarı ışığı yanarken sesli uyarı duyulacaktır. Tespit edilen hareket, 5 saniyeden kısa süreli ve devamlı değil ise sterilizasyona devam edecektir.
8. Bu uyarıdan sonra 3. kez hareket algılandığında ise sistem tamamen kapanacaktır.
9. Sürekli yanıp sönen kırmızı ışık, sterilizasyon sırasında bir hareketin algılandığını ve işlemin tamamlanmadığını gösterir. Bu durumda sterilizasyon işlemi tekrarlanmalıdır.
10. Bip sesinden sonra 3 kez yanıp sönen sarı ve kırmızı ışıklar, sterilizasyonun son aşamalarında hareket algılama nedeniyle işlemin kesildiğini, ancak ortamın en az %90 oranında sterilize edildiğini gösterir. Bu durumda kullanıcı, sterilizasyonun tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verebilir.
11. Cihazın sterilizasyon süresi 1 saat olarak ayarlanmış olup bu süre sonunda 4 metre yarıçaplı alanı sterilize etmektedir.
12. Sterilizasyon süresi, oda büyüklüğüne göre ayarlanabilmektedir. Sterilizasyon süresi ayarı için **Sterilizasyon Süresi** bölümünü inceleyiniz.



UYARILAR



1. Kesinlikle çalıştırma talimatlarına bakınız.
2. Cihazı sökmeyin veya kendi başınıza herhangi bir parçayı değiştirmeyin.
3. Dezenfeksiyon sürecinde UV ışıınımdan kaçınmak için lütfen insan, hayvan ve bitkileri alandan uzaklaştırdığınızdan emin olun.
4. Gözlerinize ve cildinize zarar vermemek için lütfen çalışırken ışığa bakmayın. UV-C ışınlarına maruz kalmak hem hayvan hem de insan sağlığı için son derece zararlıdır. Kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir.
5. Ürüne çarpmayın veya düşürmeyin, aksi takdirde ürüne veya lamba tüpüne zarar verebilir.
6. Cihaz yere düşme, kırılma, doğal afette zarar görme ya da herhangi bir darbeye maruz kalma durumları ile karşılaştığı zaman ürünün parçacıklarına el sürülmeden ve teneffüs edilmeden atıkları dikkatli bir şekilde fırça yardımı ile toplanarak poşete konulmalı ve alan havalandırılmalıdır. **20 01 21** kodlu (Floresan Lamba ve Diğer Civa İçeren Atıklar) atık kutusu oluşturularak diğer atıklardan ayrılması gerekmektedir.
7. Tehlikenin ana kaynağı tüplerde bulunan civa buharıdır. Tüp kırıldığı zaman hemen buharlaşır. Tüp başına 3 mg'a kadar civa kullanılmıştır.
8. Bu ürün elektrikli bir üründür, lütfen elektrik güvenliğine dikkat edin.

Dikkat



1. Güç açıksa ancak ışık çalışmıyorsa, lütfen elektrik fişinin güç kaynağına doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
2. Lütfen bu ürün için doğru giriş voltajını seçin.
3. Lütfen ürünü sabit olmayan, yanıcı veya nemli yerlerde kullanmayın.
4. Bu üründe anormal bir durum olduğunda, lütfen hemen güç kaynağını kesin ve firmamıza başvurun.
5. Elektrik çarpmasını önlemek için yüksek voltajlı AC fişini nemli veya ıslak bir yere koymayın.
6. UV-C tüpün kullanım ömrü 8000 saatten fazladır. UV-C tüp değişimi için firmamızdan teknik destek almanız gerekmektedir. Teknik destek için;

teknikdestek@ttaf.com.tr



TTAF[®]

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Kavaklı Mh. İstanbul Cd. No:21
Beylikdüzü -İstanbul /TÜRKİYE

Tel : +90 212 855 82 20 (Pbx)

Fax : +90 212 855 82 21

www.ttafmedikal.com

    /ttafelectronic